

NEW

ラバラバ2

商品名「ラバラバ」について
2種類の特殊なゴム（ラバー）を
使用していることから
「ラバラバ」と命名しました。

ひざ上タイプ

さらに「履きやすく」、「快適」になりました！
下肢の「むくみ」の軽減におすすめします

「ラバラバ2」は、こんな方におすすめしたい
「弱圧」の着圧ストッキングです。

- 廃用性浮腫の方、在宅生活、寝たきりの方に
- 「むくみ」があるが 弾性ストッキングを履けない方、履かせることが難しい方に

大腿部がさらに柔らかく、広くなりました

大腿部が柔らかく、横に伸びるため履きやすくなりました。

足先部分を広く、短く、柔らかく。足背のむくみに対応

足先部分は痛くなりにくい程度の圧迫がかかるように再設計しました。

【製品特長】

① “肌にやさしい” 気持ちいい履き心地

内側は柔らかく、ふんわりとした生地感です。ストッキングの横糸に「特殊ゴム」を使用し圧をコントロールしています。
圧を抑えながらも「ピタッ」と密着する履き心地です。

② “履きやすい・履かせやすい” 弱圧のストッキング

あえて「縦伸びしにくい」設計とし、自身でも上部を持って引っ張りながら履きやすいように設計。介護者も「履かせやすい」適度な圧迫力となっています。

③ “足先のむくみ” に対応

足背の部分は違う生地を使用。少し圧がかかるよう足の甲のむくみに対応。

④ “高い耐久性” でコストを抑えます。


表面を「引っかかりにくい」編み方に変更しました。特殊ゴム採用で圧迫力も維持します。

圧迫力

6~11
mmHgの
弱圧

ラバラバが、さらに履きやすく、快適になりました！

【商品特長】

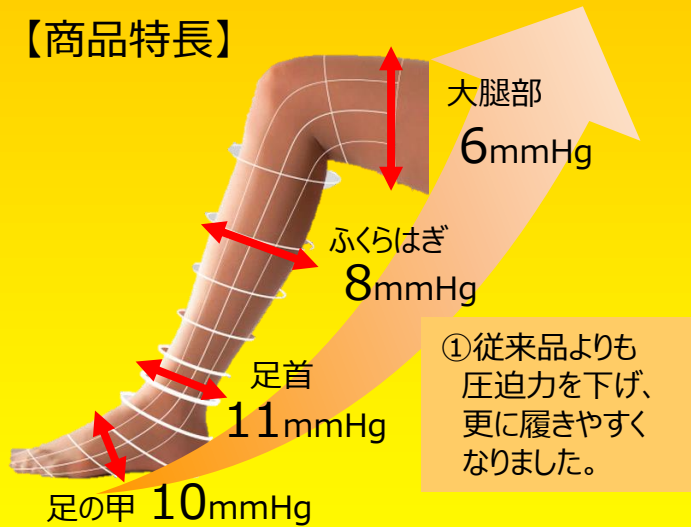

②足背の部分は生地を変えて、少し圧をかけることで「足の甲」の「むくみ」に対応しています。



【サイズ表】 ※大腿中央部、身長、足首周囲を目安にサイズを選択してください。

製品名	JANコード	サイズ	丈サイズ	身長	足首周囲	大腿中央部
ラバラバ 2 ひざ上タイプ	4589787303369	S	ショート	145.0cm～155.0cm	19.0cm～25.0cm	42.0cm～53.0cm
	4589787303376	S	ノーマル	155.0cm～165.0 cm		
	4589787303383	M	ショート	145.0cm～155.0cm	23.0cm～32.0cm	53.0cm～64.0cm
	4589787303390	M	ノーマル	155.0cm～165.0 cm		
包装入数	2枚入 ※左右1枚ずつ		「ラバラバ2」 ポジショニング： 弾性ストッキングと筒状包帯の中間のイメージ			
価格（消費税別）	2,200円					

「ラバラバ2」ポジショニング： 弾性ストッキングと筒状包帯の中間のイメージ

弾性
ストッキング

筒状包帯

ラバラバ2

「弾性ストッキング」
履きにくい、履かせにくい...

「筒状包帯」
丸まる、ずれる...

ラバラバ2 は
履きやすい、履かせやすい
ずれにくい

ご利用頂いた方の声

■むくみのある高齢者様に試着してもらいました。腕の力が弱い方でも自分で引っ張りやすく「するする」と履けました。履かせる方としても履かせやすいですね。生地も柔らかいので履いた感じも良さそうです。
<40代・看護師>

■ベッドにいる時間が長く、運動もできないのでむくみに困っていました。これを履くと足が締まった感じになって気持ちいいですね。おかげさまでむくみも減ってきました。
<60代・女性>

※お手入れの方法

- 40℃までの「ぬるま湯」での手洗い、もしくは洗濯ネットを使用して弱い水流で洗濯ください。
- 乾燥機の使用せず、日陰のぬれつり干し濡れで乾燥させてください。
- 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- ・素材：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン



【パッケージ】（表）

（裏）



※使用上の注意

- サイズの合わないものや2枚重ねでの着用はしないでください。
- 気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 爪を立てて無理に引っ張ると破れるおそれがあります。着脱の際にはご注意ください。

製造販売元：九州メディカルサービス株式会社

福岡県久留米市螢川町4番地4

資料請求先：東京営業所 ヘルスケア事業部 Tel. 03-3863-8028 / Fax. 03-3863-8029



九州メディカルサービス
株式会社ホームページ
<https://www.kyushu-med.jp/>